

ゆびそうぐ 指装具 (マレット)

装着方法

1) 装着の手順

①



① 装具本体バーの上に、固定する指関節を置きます。

② 本体横にある丸穴にマジックベルトを通します。


②



③ マジックベルトを折り返して関節を固定します。

※装着が緩すぎると効果が落ちます。
しっかりと関節が固定されていることを確認してください。

③

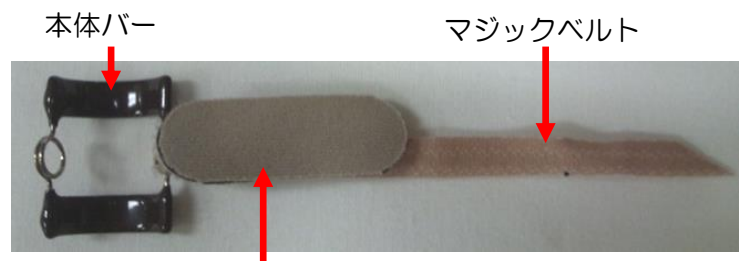

当てクッション

※クッションは予備に一枚付属しています。

※長い場合はハサミで切ることが出来ます。

《お手入れ方法》

- 本体とクッションは水洗い可能です。きつく絞ったりせずに乾いたタオルで水分を取って下さい。
- 各部ベルトの接着面に付着した糸くず等は、適宜取り除いてください。
- 直射日光を避け、日陰で保管してください。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412

《こんな場合は？》

- **ベルトのつきが弱くなった／つかなくなった**
オスマジックに毛玉や糸くずが付着していると、ベルトが付きにくいことがあります。また、ベルトは消耗品ですので、定期的な交換をお勧めいたします。
- **破れ・損耗が生じた場合**
破れ、損耗が生じ、修理をご希望の場合は当社までご連絡をお願いいたします。
- **装具の作り替えをしたい**
耐用年数や保険制度によって作製手順が異なる場合があるため、一度当社までご相談をお願いいたします。

※装具が合わなくなったと感じた際は、一度当社までご連絡ください。

使用上の注意

- 装着方法や装着期間等は医師・義肢装具士の指示に従ってください。
- ベルトを締めすぎるとめまいや気分が悪くなる場合があります。
- 押しつぶす、引っ張る等、実際の使用方法と異なる力をかけないでください。破損の原因となります。
- 本製品は、各個人の装着箇所を採寸・採型し、製作する製品（装具）です。
目的以外の使用、又はご本人様以外が装着・使用された際の怪我や破損等に関してのお問い合わせにはお応えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
- オーダーメイドの為、お手持ちの製品（装具）が掲載写真とは作りが異なる場合があります。