


そくていそうぐ 足底装具（室内用）

装着方法

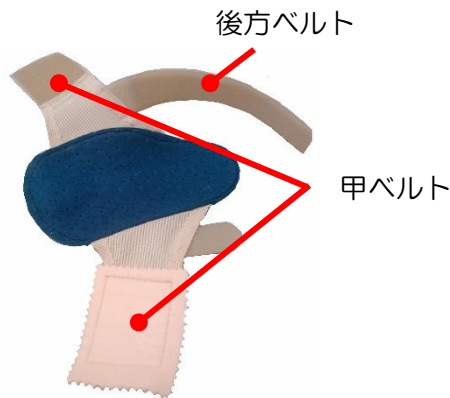

装着の手順

① 装着前に左右、表裏の確認をしてください。
（写真は左足用です。）



② かかとを合わせて、足の甲の部分のベルトを止めてください。

③ かかとの後方ベルトを止めてください。

※ 2回目以降は、後方ベルトを止めたまま脱ぎ履きして、甲ベルトのみで止めることができます。



装着した状態

《お手入れ方法》

- 本装具は防水仕様ではありませんので、濡れた場合はできるだけ早く乾かしてください。
- 各部ベルトの接着面に付着した糸くず等は、適宜取り除いてください。
- 水分や直射日光をさけ、日陰で保管してください。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412

《こんな場合は？》

- **ベルトのつきが弱くなった／つかなくなった**
オスマジックに毛玉や糸くずが付着していると、ベルトが付きにくいことがあります。またベルトは消耗品ですので、定期的な交換をお勧めいたします。
- **破れ・損耗が生じた場合**
破れ・損耗が生じ、修理をご希望の場合は当社までご連絡お願いいたします。
- **装具の作り替えをしたい**
耐用年数や保険制度によって作製手順が異なる場合があるため、一度当社までご相談お願いいたします。

※ 装具が合わなくなったと感じた際は、一度当社までご相談ください。

使用上の注意

- ・ 装着方法や装着期間等は医師・義肢装具士の指示に従ってください。
- ・ 熱器具(ストーブ等)の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。
- ・ 押しつぶす、引っ張る等、実際の使用方法と異なる力をかけないでください。破損の原因となります。
- ・ 洗濯、水洗い等を行わないでください。
- ・ 浴室や直接水が当たる場所では使用しないでください。
- ・ 本製品は、各個人の装着箇所を採寸・採型し、製作する製品（装具）です。
目的以外の使用、又はご本人様以外が装着・使用された際の怪我や破損等に関してのお問い合わせにはお応えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
- ・ オーダーメイドの為、お手持ちの製品（装具）が掲載写真とは作りが異なる場合があります。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412