

## 装着方法

### 1) 前後上下の確認

前にはベルトが2～3本付いています。

後は「一体式」や「マジックベルト割り式」があります。

(※写真は一体式です)



### 2) 装着位置の確認

左図のように骨盤ウエスト部（赤丸印部）にしっかりと合わせて装着します。

※太ももを上げた際や座った際に、コルセットが過度に太ももに食い込まない位置に装着してください。



### 3) 装着の手順

装着は前のベルトで行います。

①下のベルトで腹部を締めます。

②上のベルトで胸部を締めます。

③上下ベルトを増し締めしていきます。

※下のベルトはしっかりと、上のベルトは背筋を伸ばし、体に沿う程度で締めてください。

### 《お手入れ方法》

本製品にはクッション材や皮革を使用している箇所があるため、発汗など水分を含んだ際は、乾いた布でふき取り、日陰でよく乾燥させてから使用してください。

# 《こんな場合は？》

## ・トイレに行く場合…

コルセットの上に下着やズボン等をかぶせるようにすると、コルセットを外さずに済ますことができます。

## ・座った時に痛い

コルセットは、骨盤をしっかり固定する事で効果を発揮しますが、低い椅子や床面に座ると太ももがつかえて痛いことがあります。

その場合は背もたれのある高めの椅子を使用し、もたれる姿勢をおとりください。

## ・コルセットが緩くなってきた／きつくなってきた

後がマジックベルト割り式の場合

前のベルトだけで調節できない場合は、後のベルトの締め具合を調節してください。

後が一体式の場合は、当社までご連絡ください。

## 使用上の注意

- ・装着時には必ず肌着を着けてください。
- ・ベルトを締めすぎるとめまいや気分が悪くなる場合があります。
- ・装着方法や装着期間等は医師・義肢装具士の指示に従ってください。
- ・本製品は、各個人の装着箇所を採寸・採型し、製作する製品（装具）です。  
目的以外の使用、又はご本人様以外が装着・使用された際の怪我や破損等に関してのお問い合わせにはお応えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
- ・オーダーメイドの為、お手持ちの製品（装具）が掲載写真とは作りが異なる場合があります。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412