

# ようついそうぐ 腰椎装具

## 軟性（ダーメンコルセット）

### 装着方法

#### 1) 前後上下の確認

ベルトがある方を前にして、後の紐の結び目（赤丸印部）が上にくるように装着してください。



#### 2) 装着位置の確認

骨盤をしっかり覆うように装着します。

※太ももを上げた際や座った際に、コルセットが過度に太ももに食い込まない位置に装着してください。

#### 3) 装着の手順

装着は前のベルトのみで行います。

ベルトを締める順番は

① 下から2番目のベルトを仮止めします。

② 1番下のベルトを締めます。

③ 1番上のベルトを締めます。

④ ベルトを①～③の順番に増し締めをします。

※適度な圧迫ですれがないようにベルトを締めて、背筋を伸ばし、体に沿うようにしてください。



#### 《お手入れ方法》

1) 中性洗剤で手もみ洗いして下さい。

2) よくすすぎ、きつく絞ったりせずに乾いたタオルで水分を取ってください。

3) 直射日光を避け、陰干ししてください。

※乾燥機・アイロン・ドライクリーニングは使用しないでください。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412

# 《こんな場合は？》

## • トイレに行く場合…

コルセットの上に下着やズボン等をかぶせるようにすると、コルセットを外さずに済ますことができます。

## • 座った時に痛い

コルセットは骨盤をしっかり固定する事で効果を発揮しますが、低い椅子や床面に座ると太ももがつかえて痛いことがあります。

その場合は、背もたれのある高めの椅子を使用し、もたれる姿勢をおとりください。

## • コルセットが緩くなってきた／きつくなってきた

前のベルトだけで調節できない場合は、後の紐で調節してください。

※ベルトと紐で調整できない場合は当社までご連絡ください。

## 使用上の注意

- 装着時には必ず肌着を着けてください。
- ベルトを締めすぎるとめまいや気分が悪くなる場合があります。
- 装着方法や装着期間等は医師・義肢装具士の指示に従ってください。
- 本製品は、各個人の装着箇所を採寸・採型し、製作する製品（装具）です。  
目的以外の使用、又はご本人様以外が装着・使用された際の怪我や破損等に関してのお問い合わせにはお応えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
- オーダーメイドの為、お手持ちの製品（装具）が掲載写真とは作りが異なる場合があります。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412